
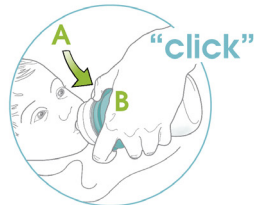


Så här fungerar BabyMed:

Dosett BabyMed är en tillsats till den vanliga nappflaskan.

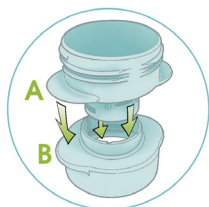

Tillsatsen består av två delar som sätts ihop och bildar en separat behållare för medicinen.

Fyll flaskan med önskad vätska och skruva på tillsatsen. Dosera medicinen i tillsatsen. Skruna på dinappen*.

Låt barnet suga ett par sug, tills de fått i sig medicinen. Tryck sedan ihop vingarna utan att ta bort nappen från barnets mun. Då kommer vätskan automatiskt och barnet hinner inte uppfatta smaken av medicinen.

Barnet kan nu fortsätta att dricka i lugn och ro.

BPA fri

*Dinapp med variable flow. Anpassar sig efter dryck och barnets ålder.

Vill du se hur Dosett BabyMed fungerar?
Scanna QR-koden för att se filmen.

